

DiosolGenerator™ PROTEC TUBE & TUBE+ Betriebsanleitung



Vertrieb & Support:

DIOP
GmbH & Co KG

**Büro, Lager &
Desinfektions-Trainingszentrum:**

Hasselborner Straße 19-21
35647 Waldsolms / Germany

Telefon: +49 (0)6085 / 8069505

E-Mail: info@diopgmbh.com

Internet:

- www.hygiene-standard.com (Website)
- www.disinfection-shop.com (Online Shop)

Twitter: www.twitter.com/diop_hygiene

Facebook: www.facebook.com/hygiene.disinfection

LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/diop-gmbh-co-kg/>



Hersteller:



Schütz Dental GmbH – 61191 Rosbach



Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1 SICHERHEIT	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
1.1 ZULÄSSIGE DESINFEKTIONSMITTEL	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
1.2 SICHERHEITSHINWEISE	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
1.3 SICHERHEITSMABNAHMEN (VOM BETREIBER DURCHZUFÜHREN).....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
1.4 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
1.5 EINGEBAUTE SICHERHEITSSYSTEME	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
2 ALLGEMEINE GEFAHRENHINWEISE	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
2.1 GEFAHRENBEREICH	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
2.2 ÜBERSICHT DIOSOL™-KONZENTRATIONEN	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
2.3 BEDIEN- UND WARTUNGSPERSONAL	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
2.4 EINBAU VON ERSATZ- UND VERSCHLEIßTEILEN.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
2.5 AUSSCHALTEN DES GERÄTES.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
3 KURZBESCHREIBUNG (BESTIMMUNGSGEMÄBE VERWENDUNG) ..	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
4 TECHNISCHE DATEN DES GERÄTES	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
5 TRANSPORT UND VERPACKUNG	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
6 BEDIENELEMENTE	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
6.1 GEWÖHNLICHE VERWENDUNG	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
6.2 MULTIFUNKTIONELLE VERWENDUNG.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
7 MONTAGE	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
8 AUFSTELLUNG UND INBETRIEBNAHME	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
8.1 AUFSTELLUNG DES DIOSOLGENERATOR™ PROTEC TUBE & PROTEC TUBE+.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
8.2 INBETRIEBNAHME	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
9 DOKUMENTATION	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
10 INBETRIEBNAHME TUBE-SCHLAUCHSYSTEM MIT SCHLAUCHVERLÄNGERUNG	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
10.1 EINZELKOMPONENTEN DER TUBE-APPLIKATIONSTECHNIK:	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
10.2 SCHRITTWEISE VORGEHENSWEISE ZUR INBETRIEBNAHME DES SCHLAUCHSYSTEMES:.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
11 WARTUNG/INSTANDHALTUNG	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
12 NOTFALL	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
13 DEMONTAGE/ENTSORGUNG	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
14 ERSATZTEILE	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
15 GEWÄHRLEISTUNG	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
16 ZUSÄTZLICHE UNTERLAGEN	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
16.1 DOKUMENTATION VERNEBELUNG	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
16.2 FORMULAR ZUR DURCHFÜHRUNG VON ABKLATSCHTESTS	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.
16.3 DIOSOL™ DESINFEKTIONSMITTEL: PRODUKTBESCHREIBUNG & SICHERHEITSDATENBLÄTTER.....	FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.



- 16.4 KURZANLEITUNG **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.5 WISSENSCHAFTLICHE DOKUMENTE, GUTACHTEN UND TESTS **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.6 WELCHES DIOSOL GEGEN WELCHE KEIME / ERREGER-GRUPPEN / KRANKHEITEN? .. **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.7 ELEKTRONISCHE KOMPATIBILITÄT **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.8 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER DIOSOLGENERATOR RAUMDESINFEKTION..... **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.9 WIRKUNGSBEREICH ABCD (SPOREN) **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.10 ZEITSTRAHL DER AHP RAUMDESINFEKTION MIT DEM DIOSOLGENERATOR **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.11 DAS STARTER-PAKET ZUR RAUMDESINFEKTION MIT DEN MF + TUBE MODELLEN **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.12 DIE BEDEUTUNG DER RELATIVEN LUFTFEUCHTE FÜR IHREN DESINFEKTIONSERFOLG**FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.13 DIE VORTEILE DES AHP VERFAHRENS GEGENÜBER KLASSISCHEN BEGASUNGSVERFAHREN**FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.14 SMARTE UND EINFACHE ANWENDUNG IN NUR 8 SCHRITTEN..... **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.15 3D-CHEMOINDIKATOREN CDS47A (DREIDIMENSIONALE PYRAMIDEN)**FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.16 SELBSTKLEBENDE H₂O₂-CHEMOINDIKATOREN C-V-P-SV6 **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.17 INFORMATION ZUR HANDHABUNG WASSERSTOFFPEROXID TESTSTÄBCHEN (CHEMOINDIKATOREN) **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.18 DIOSOLGENERATOR: EINSATZ NUR MIT DIOSOL-PRODUKTEN..... **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.19 BIOLOGISCHE INDIKATOREN ZUR MIKROBIOLOGISCHEN PROZESSKONTROLLE DER H₂O₂-KALTVERNEBELUNG **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.20 BAKTERIZIDE VALIDIERUNG DES DIOP-RAUMDESINFEKTIONSVERFAHRENS MITTELS DIOFOG-CONTROLLER BIOINDIKATOREN (WIRKUNGSBEREICH A)..... **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.21 SPOROZIDE VALIDIERUNG DES DIOP-RAUMDESINFEKTIONSVERFAHRENS MITTELS DIOSPORE-CONTROLLER BIOINDIKATOREN (WIRKUNGSBEREICH ABCD)..... **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.22 CHECKLISTE ZUR VORBEREITUNG VON RÄUMEN UND UMGEBUNGEN VOR DURCHFÜHRUNG DER DESINFEKTIONSMAßNAHME..... **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.23 WIE LANGE VERNEBELN DIOSOLGENERATOREN?..... **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.24 WICHTIGER HINWEIS: DER WARTUNGS-INTERVALL FÜR IHREN DIOSOLGENERATOR**FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.25 **WARNHINWEIS: EINSATZ VON NATRIUMHYPOCHLORIT-LÖSUNGEN („HYPOCHLORIGE SÄURE“) IM DIOSOLGENERATOR** **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.26 ACHTUNG: KORREKTE HANDHABUNG DES VOLUMEN-REGLERS (SCHWARZER DREHKNOFF)**FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**
- 16.27 DESINFEKTIONSMITTEL-HINWEIS FÜR DEN DIOSOLGENERATOR **FEHLER! TEXTMARKE NICHT DEFINIERT.**



